

AUDAR[®]

User Manual

E1



August International Ltd

Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.audarwatch.com

- EN** Smart Healthcare Watch
- FR** Montre Connectée Santé
- DE** Intelligentes Gesundheitsarmband
- IT** Healthcare Intelligente d'Orologio
- ES** Pulsera Inteligente para el Cuidado de la Salud
- JP** スマートヘルスケアウォッチ

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung. Bitte öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Dies kann gefährlich sein, außerdem erlischt damit die Herstellergarantie.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung







Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden: <http://augustint.com/en/declaration/>

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: + 49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung und Benutzung

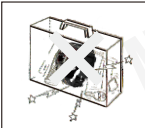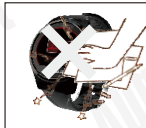	Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.		Lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
	Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.		Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
	Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.		Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehöerteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

	Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.		Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven oder grobkörnigen Reinigungsmitteln wie z.B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.
---	---	--	--


2. Hauptmerkmale

- EKG/PPG Herzfrequenz.- und Blutdruckmessgerät
- Schrittzähler mit Distanz.- und Kalorienmessung
- Schlafracker zur Überwachung der Schlafqualität
- Anruf.- und Nachrichtenhinweise
- Kompatibel mit Apple iOS und Android

3. Lieferumfang



E1

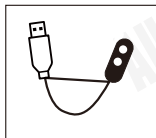

USB Ladekabel



Schnellstartanleitung

4. Teile und Funktionen



1. TFT-Farbdisplay
2. Touch-Taste
3. Ein- / Ausschalter
4. EKG-Metallring
5. Armband

Schnellstartanleitung

1. Scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Gerät oder suchen Sie nach AUDAR im Google Play Store oder im Apple App Store um die App herunterzuladen und zu installieren.



notigt Android 4.4 und höher oder iOS 8.2 und höher.


1. Bitte laden Sie das E1 Armband vor der ersten Nutzung oder nach längerem nicht benutzen vollständig auf. Um das E1 Armband aufzuladen verbinden Sie es mit dem magnetischen Ladekabel und stecken Sie das USB-Ladekabel in einen stromversorgten USB-Anschluss.
2. Das Akkusymbol füllt sich während des Ladevorgangs. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung am USB-Anschluss oder am Ladegerät 5V beträgt.
3. Halten Sie die Touch-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt um das E1 Armband einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das E1 Armband nicht weiter als 10 Meter von Ihrem Gerät entfernt befindet. Starten Sie die AUDAR App und drücken Sie auf "Armband verbinden" um das Armband zu koppeln. Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigungen erteilen und die Systemanforderungen akzeptieren wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie nach dem Koppeln die angeforderten persönlichen Daten ein und klicken Sie auf "Weiter". Legen Sie dann Ihr Gesundheitsziel fest (z.B. die Anzahl der Schritte, die Sie täglich ausführen möchten). Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Speichern, um zur Startseite der App zu gelangen.
6. Das E1 Armband ist nun einsatzbereit.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	1
2. Hauptmerkmale	2
3. Lieferumfang	2
4. Teile und Funktionen	2
5. Ausloggen	5
6. Bedienung	5
6.1 Armband	5
6.1.1 Zeit und Datum (Standardanzeige)	6
6.1.2 Schritte	6
6.1.3 Kalorien	6
6.1.4 Distanz	7
6.1.5 EKG	7
6.1.6 Herzfrequenz	8
6.1.7 Blutdruck	8
6.1.8 Schlafmodus	8
6.1.9 Stoppuhr	9
6.1.10 Nachrichten	9
6.1.11 Gerät finden	10
6.1.12 Einstellung Uhrenanzeige	10
6.1.13 Helligkeit	11
6.1.14 E1 Informationen	11
6.2 AUDAR Anwendungen	12
6.2.1 Armband verbinden	12
6.2.2 Persönliche Informationen	13
6.2.3 Startseite	13
6.2.3.1 Schritte	14
6.2.3.2 Schlaf	14
6.2.3.3 Herzfrequenz	15
6.2.3.4 HRV Analyse (EKG)	16
6.2.3.5 Blutdruck	17
6.2.3.6 Ermüdung	18
6.2.4 Geräteoptionen	19
6.2.4.1 Persönliche Informationen	19
6.2.4.2 Wochenreport	20
6.2.4.3 Kamera aktivieren	20
6.2.4.4 Joggen	21
6.2.4.5 Gerätemanagement	21
6.2.4.6 Allgemeine Einstellungen	23
6.2.4.7 Über	23
6.2.4.8 CareMate Information	23
7. Problemlösung	26
8. Technische Daten	26
9. Garantie	27

5. Ausloggen

Um das E1 Armband aufzuladen verbinden Sie es mit dem magnetischen Ladekabel und stecken Sie das USB-Ladekabel in einen Stromversorgten USB-Anschluss.

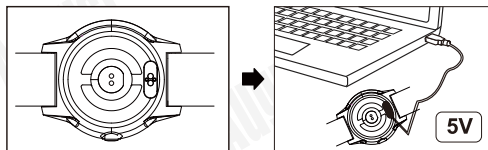

Das Akkusymbol füllt sich während des Ladevorgangs. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung am USB-Anschluss oder am Ladegerät 5V beträgt.

6. Bedienung

6.1 Armband

Halten Sie die Touch-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt um das E1 einzuschalten.

Zum Ausschalten des E1:

1. Drücken Sie die Touch-Taste um den Aus-Modus auszuwählen.
2. Halten Sie die Touch-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
3. Drücken Sie die Touch-Taste und wählen „Ja“.
4. Halten Sie die Touch-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt um zu bestätigen, dass Sie das Armband ausschalten möchten.

Drücken Sie die Touch-Taste um den Bildschirm zu aktivieren. Nach der Aktivierung leuchtet der Bildschirm für ca. 5 Sekunden auf. Während der Bildschirm aktiviert ist drücken Sie die Touch-Taste um die folgenden Modi zu durchlaufen: Uhrzeit und Datum (Standardanzeige), Schritte, Kalorien, Distanz, EKG, Herzfrequenz, Blutdruck, Schlaf, Sportmodus, Stoppuhr, Nachrichten, Gerät finden, Einstellung Uhrenanzeige, Helligkeit und E1-Systeminformationen.

Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

6.1.1 Zeit und Datum (Standardanzeige)



Tag
Datum (DD/MM)

Zeitanzeige

Schritte Herzfrequenz

6.1.2 Schritte



Schritte

Das E1 zeigt Ihre zurückgelegten Schritte an. Für eine möglichst genaue Messung empfehlen wir, dass die im Abschnitt "Persönliche Informationen" eingegebenen Daten so genau wie möglich sind (siehe 5.2.2).

6.1.3 Kalorien



Kalorien

Das E1 berechnet die Kalorien die Sie verbraucht haben anhand der Anzahl der zurückgelegten Schritte.

6.1.4 Distanz



Distanz

Das E1 berechnet die zurückgelegte Distanz aus der Anzahl der Schritte die Sie unternommen haben. Für eine möglichst genaue Anzeige empfehlen wir Ihnen, dass die im Abschnitt "Persönliche Informationen" eingegebenen Daten so genau wie möglich sind (siehe 5.2.2).

6.1.5 EKG



EKG



EKG
Messung
(Darstellung)



Wenn Sie in den EKG-Modus wechseln und die Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird die EKG-Messung aktiviert. Um die EKG Messung zu starten, platzieren Sie Daumen und Finger, wie abgebildet, auf dem EKG-Metallring und halten Sie die Finger während der Messung ruhig. Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern. Nach Abschluss können die EKG-Daten in der AUDAR APP überprüft werden.
Hinweis: Wenn die EKG-Kurve gestört ist oder stark abweicht, sind die Herzfrequenz und der Blutdruck möglicherweise nicht genau gemessen worden. Bitte messen Sie sie erneut. Wenn die Leitfähigkeit während des EKG-Tests schlecht ist, befeuchten Sie Ihre Finger vor dem Test.

Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.

6.1.6 Herzfrequenz



Herzfrequenz

Wenn Sie in den Herzfrequenzmodus wechseln, beginnt das E1 mit der Messung Ihrer Herzfrequenz. Dies kann bis zu einer Minute dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, vibriert das E1 und zeigt Ihre aktuelle Herzfrequenz in BPM (Schläge pro Minute) an.

6.1.7 Blutdruck



Blutdruck

Wenn Sie in den Blutdruckmodus wechseln, beginnt das E1 mit der Messung Ihres Blutdrucks. Dies kann bis zu einer Minute dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, vibriert das E1 und zeigt Ihre aktuelle Blutdruckmessung an.

6.1.8 Schlaf



Schlafdaten

Wenn Sie in den Schlafmodus wechseln zeigt das E1 Daten zu Ihrem Schlaf an.

6.1.9 Stoppuhr



Stoppuhr

Halten Sie die Touch-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie die Touch-Taste erneut um die Stoppuhr anzuhalten oder fortzusetzen.

Halten Sie im Pausenmodus die Touch-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt um zum Hauptmenü zurückzukehren.

6.1.10 Nachrichten



Nachrichten

Wenn Sie in den Nachrichtenmodus wechseln zeigt das E1 eine Zusammenfassung der Nachrichten auf Ihrem Telefon an. Halten Sie die Touch-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt und das E1 zeigt Details zu den Nachrichten an. Drücken Sie erneut die Touch-Taste um die Nachrichten umzuschalten.

6.1.11 Gerät finden



Verbundenes Gerät finden

Halten Sie die Touch-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt um die Funktion "Suche Armband" zu aktivieren. Das gekoppelte Gerät klingelt oder vibriert, je nach Einstellung, sodass Sie es lokalisieren können.

Hinweis: Das gekoppelte Gerät muss sich in Bluetooth-Reichweite befinden um gefunden zu werden (10m). Wenn Sie das Gerät nicht hören können, verändern Sie Ihre Position und aktivieren die Funktion erneut.

6.1.12 Einstellung Uhrenanzeige



Einstellung Uhrenanzeige

Drücken Sie die Touch-Taste, um verschiedene Uhrenanzeigen auszuwählen.




Dials 1



Dials 2



Dials 3

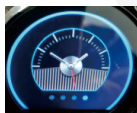

Dials 4


6.1.13 Helligkeit



Helligkeit

Halten Sie die Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt um die Funktion zur Helligkeitseinstellung des Displays zu aktivieren. Drücken Sie dann die Touch-Taste um die Helligkeit einzustellen.

6.1.14 E1 Informationen

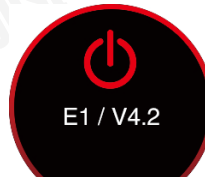

E1 System Informationen

Im Abschnitt E1 System Informationen erhalten Sie eine eindeutige Kennung für das E1. Dies ist nützlich wenn Sie das Armband verbinden wollen während sich mehrere E1 Armbänder in der Nähe befinden.

E1 Ausschalten:

Halten Sie die Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die Touch-Taste erneut und wählen „Ja“. Halten Sie die Touch-Taste wiederum 3 Sekunden lang gedrückt, um zu bestätigen, dass Sie den E1 ausschalten möchten.



6.2 AUDAR Anwendungen

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie nach "AUDAR" im Google Play Store oder im Apple App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren.






Benötigt entweder Android 4.4 und höher oder iOS 8.2 und höher.

6.2.1 Armband verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und stellen Sie sicher, dass es sich nicht weiter als 10 Meter vom E1 Fitnessarmband entfernt befindet.
2. Starten Sie die „AUDAR“ App und wählen Sie „Armband verbinden“.
3. Wählen Sie das E1 Fitnessarmband aus der Geräteliste aus.
4. Wenn mehr als ein E1 Fitnessarmband in der Nähe ist, überprüfen Sie bitte die MAC-Adresse Ihres Armbandes um das richtige auszuwählen. (siehe 5.1.10).
5. Nach dem das E1 Fitnessarmband verbunden wurde, wird das Bluetooth Symbol auf dem Armband angezeigt.


Hinweis: Stellen Sie bei Android-Geräten sicher, dass Sie „AUDAR“ die Systemberechtigung erteilen wenn Sie dazu aufgefordert werden. Stellen Sie bei iOS-Geräten sicher, dass Sie die Bluetooth-Verbindungsanforderung bestätigen wenn Sie dazu aufgefordert werden.

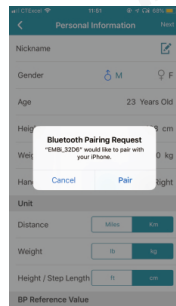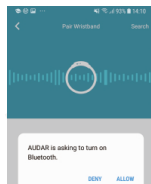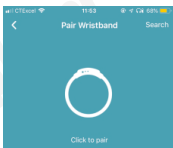

6.2.2 Persönliche Informationen

Geben Sie nach dem verbinden des E1 Fitnessarmband die angeforderten persönlichen Daten ein und klicken Sie auf "Weiter". Legen Sie dann Ihr Gesundheitsziel fest (die Anzahl der Schritte die Sie täglich ausführen möchten). Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Speichern, um zur Startseite zurückzukehren.

Sie können diese Informationen jederzeit später bearbeiten. Weitere Anweisungen finden Sie in 5.2.4.1

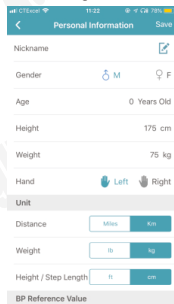

6.2.3 Startseite

Auf der Startseite werden die Anzahl der von Ihnen zurückgelegten Schritte, die Zeit die Sie geschlafen haben, sowie die letzten Messungen Ihrer Herzfrequenz, Ihrer HRV-Analyse (EKG), Ihres Blutdrucks und Ihres Müdigkeitszustands angezeigt.




Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

6.2.3.1 Schritte

Die aktuelle Schrittzahl wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf den Abschnitt „Laufen“ um sich weitere Informationen anzeigen zu lassen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

- Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Tippen Sie auf eine Leiste in der Tabelle um die genaue Anzahl der zurückgelegten Schritte anzuzeigen.
- Unterhalb des Balkendiagramms finden Sie weitere Informationen zu den zurückgelegten Schritten, der zurückgelegten Entfernung und dem Kalorienverbrauch.
- Drücken Sie auf das <Notizen> Symbol um Ihr Gesundheitsziel zu ändern (die Anzahl der Schritte die Sie täglich ausführen möchten).
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um die Länge des angezeigten Zeitraums zu ändern.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.

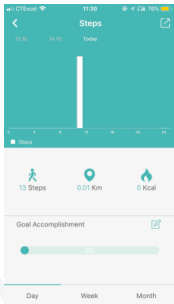


6.2.3.2 Schlaf

Die neuesten Daten zu Ihrem Schlaf werden auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite auf den Abschnitt „Schlaf“ um weitere Informationen anzuzeigen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

- Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Tippen Sie auf eine Leiste in der Tabelle um die genaue Schlafdauer während dieser Zeit anzuzeigen.

- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um die Länge des angezeigten Zeitraums zu ändern.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.

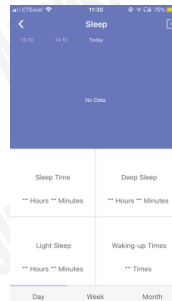


6.2.3.3 Herzfrequenz

Die zuletzt gemessene Herzfrequenz wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite auf den Abschnitt „Herzfrequenz“ um weitere Informationen anzuzeigen oder eine Messung durchzuführen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.


- Die letzte Messung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt. Die Herzfrequenzüberwachung im Gerät und EKG-Tests können die Herzfrequenzdaten aktualisieren.
- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um ein Balkendiagramm Ihrer Herzfrequenzmessungen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Leiste im Diagramm um detailliertere Informationen anzuzeigen. Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.

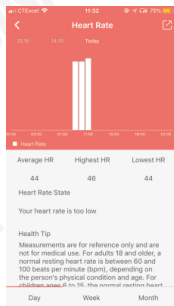


6.2.3.4 HRV Analyse (EKG)

Drücken Sie "EKG-Messung" und anschließend "Messung starten" um die EKG-Messung zu beginnen. Um ihr EKG in der APP zu messen, legen Sie Ihren Daumen und Finger wie abgebildet auf den EKG-Metallring und halten Sie Ihre Finger während der Messung ruhig. Dies kann ungefähr 30 Sekunden dauern. Anschließend können Sie ihre EKG-Daten überprüfen.

- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie „vorherige Daten anzeigen“ um sich ihre Detailberichte, Gesundheitsberichte und EKG-Daten wiedergeben zu lassen.
- Wenn die Leitfähigkeit während des EKG-Tests schlecht ist, befeuchten Sie Ihre Finger vor dem Test.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.

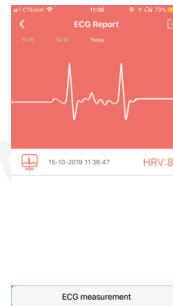

ECG measurement

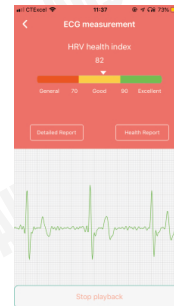




Stop play/track

6.2.3.5 Blutdruck

Der zuletzt gemessene Blutdruck wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf der Startseite auf den Abschnitt „Blutdruck“ um weitere Informationen anzuzeigen oder eine Messung durchzuführen.

Hinweis: Die Messungen dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

- Die letzte Messung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um ein Balkendiagramm Ihrer Blutdruckmessungen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Leiste im Diagramm um detailliertere Informationen anzuzeigen. Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.

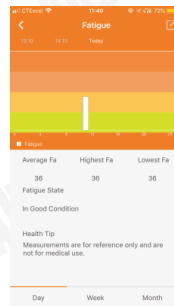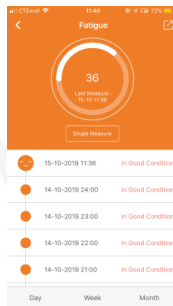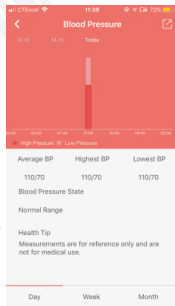


6.2.3.6 Ermüdung

Der Ermüdungszustand wird auf der Startseite angezeigt. Tippen Sie auf den Abschnitt „Müdigkeit“ um detailliertere Informationen anzuzeigen oder eine neue Messung durchzuführen.

- Die letzte Messung wird in der oberen Hälfte des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie auf <Messung starten> um eine neue Messung durchzuführen.
- Weitere Messungen werden in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Schieben Sie den Bildschirm nach oben um ältere Messungen anzuzeigen.
- Wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus um ein Balkendiagramm anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Leiste im Diagramm um detailliertere Informationen anzuzeigen. Schieben Sie das Datum nach rechts um ältere Daten anzuzeigen.
- Drücken Sie auf das <Teilen> Symbol (rechts oben) und wählen Sie einen Social Media Service aus um die neuesten Ergebnisse zu teilen.

6.2.4 Geräteoptionen

Drücken Sie <☰> (oben links) um das Menü mit den Geräteoptionen anzuzeigen. Tippen Sie auf eine der Optionen um den entsprechenden Bereich aufzurufen.

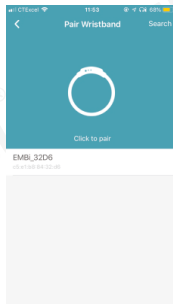

6.2.4.1 Persönliche Informationen

In diesem Abschnitt können Sie sich die folgenden persönlichen Informationen anzeigen lassen und verändern:

- Geschlecht
- Alter
- Größe
- Gewicht
- Tragehand
- Einheiten wählen für:
 - Distanz
 - Größe
 - Gewicht
 - Zeitformat
- Schlafeneinstellungen
 - Einschlafzeit
 - Aufwachzeit
- Blutdruck
 - Referenzwert
 - Privater Modus
 - Systolisch
 - Diastolisch

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Speichern, um zur Startseite der App zurückzukehren.

6.2.4.2 Wochenreport

In dem Wochenreport bekommen Sie einen Überblick über alle Daten der Vorwoche.



6.2.4.3 Kamera aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie, durch die Bewegung des E1 Fitnessarmband mit Ihrem Handgelenk, die Kamera Ihres Telefons automatisch aktivieren.

1. Tippen Sie auf "Kamera aktivieren" um zu beginnen.
2. Sobald die Kamera aktiviert ist, bewegen Sie das E1 Fitnessarmband mit ihrem Handgelenk, um ein Foto aufzunehmen.
3. Drücken Sie auf "Abbrechen" (x) um zur Startseite zurückzukehren.




6.2.4.4 Joggen

Diese Funktion hilft Ihnen Ihren Lauf zu überwachen.

Klicken Sie auf "Gesamte Laufzeit" um Ihren Verlauf der letzten Aktivitäten anzuzeigen.


Drücken Sie auf "Start" um mit dem Laufen zu beginnen.



- Drücken Sie die < ⏪ > (Karte anzeigen) um zwischen Normal.- und Kartenanzeige zu wechseln.
- Halten Sie die gelbe Taste gedrückt um zu pausieren.
- Drücken Sie die grüne Taste um ihren Lauf fortzusetzen.
- Drücken Sie die rote Taste um ihren Lauf zu beenden.

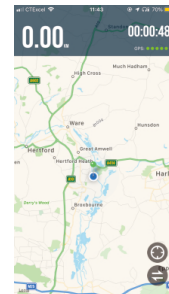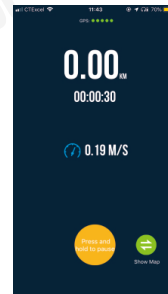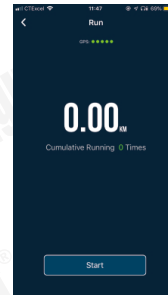

6.2.4.5 Gerätemanagement

In dem Bereich „Gerätemanagement“ können Sie den Akkuladestand des E1 Fitnessarmband überprüfen und die folgenden Funktionen verwenden:

- Verbindungsmanagement
-Zeigt Ihnen den Verbindungsstatus des Armbandes an.
-Sie können hier die Verbindung des Armbandes trennen
- Suche Armband
-Wenn Sie auf "Suche Armband" klicken, vibriert das Armband und Sie können es besser finden. Hinweis: Die Suchfunktion funktioniert nur, wenn sich das Armband innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet. (10m)
- Erinnerung (Ermöglicht das Einstellen stiller Vibrationsbenachrichtigungen)
-Anrufmitteilung: <  > wird angezeigt wenn ein Anruf eingeht
-Nachrichtenmitteilung: <  > wird angezeigt wenn eine Nachricht eingeht.
-Wecker: Das Armband vibriert zur eingestellten Zeit und das <  > wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Speichern“ wenn Sie ihre eingaben gemacht haben.
-App Mitteilungen: In diesem Abschnitt können Sie festlegen, ob Benachrichtigungen aus einer Reihe von Apps wie Facebook, Twitter, WhatsApp usw., angezeigt werden sollen.
-Nicht stören: Mit der Funktion „Nicht stören“ können Sie einen Zeitraum festlegen, in dem alle Benachrichtigungen ignoriert werden (z. B. nachts von 23:00 bis 08:00 Uhr). Klicken Sie auf „Speichern“ wenn Sie ihre eingaben gemacht haben.
- Automatische Bildschirminaktivierung: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bildschirm des EMBi Fitnessarmband aktiviert sobald Sie Ihr Handgelenk bewegen.
- Automatische Stündliche Messung: Wenn diese Option aktiviert ist, wird stündlich automatisch eine Messung durchgeführt. Wir empfehlen diese Funktion zu aktivieren um die genauesten Daten zu erhalten.
- Firmware Upgrade: Diese Seite zeigt die aktuelle Version des Armbandes an und informiert Sie ob eine neuere Version verfügbar ist.

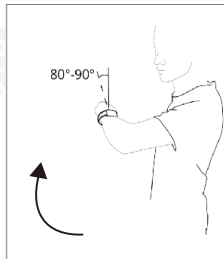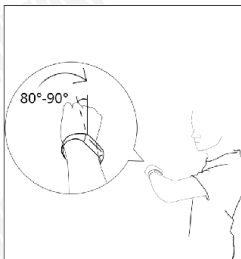

6.2.4.6 Allgemeine Einstellungen

- Persönliche Informationen: Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 5.2.4.1.
- Gesundheitsziel: Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Schritte festlegen, die Sie täglich ausführen möchten.
- Ermöglicht Ihnen Apps von Drittanbietern zu integrieren
-Apple Health (nur für Apple Geräte)
-Google Fit (nur für Android Geräte)
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Ermöglicht das vollständige zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Dabei werden alle Daten gelöscht und die Verbindung zwischen der App und dem Armband wird getrennt.
- Alle Daten der App löschen: Mit dieser Option können Sie alle in der App gespeicherten Daten löschen..
- Alle Daten vom Armband löschen: Mit dieser Option können Sie alle auf dem Armband gespeicherten Daten löschen.

6.2.4.7 Über



Im Abschnitt „Über“ wird die aktuelle Version der Anwendung angezeigt und Sie können auf die Hilfefunktion zugreifen.

Unter "Hilfe" können Sie folgendes tun:


- Senden Sie uns Feedback und geben Sie uns Empfehlungen zum Armband oder zur August AUDAR-Anwendung oder melden Sie uns einen Fehler.
- Häufig gestellte Fragen (FAQ): Zeigt Ihnen eine Liste häufig gestellter Fragen an (Drücken Sie auf eine der Fragen um einen Lösungsvorschlag zu bekommen).

6.2.4.8 CareMate Information

- Bewegungs- und Gesundheitsdaten von Personen abonnieren
Bewerbungen als CareMate können über die Handynummer oder E-Mail-Adresse eingereicht werden, die bei der Registrierung für ein AUDAR-Konto verwendet wurde.

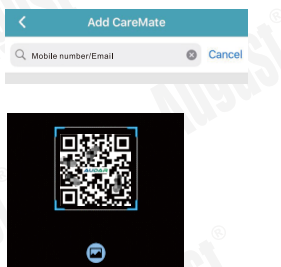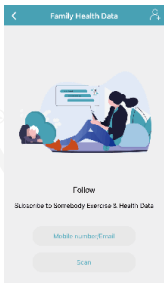


Sobald die Anfrage genehmigt ist, können Sie oben rechts auf "Meine Wächter" klicken, um eine Liste der Nutzer anzuzeigen, denen Sie folgen, und deren Bewegungs- und Gesundheitsdaten in Echtzeit zu überwachen.

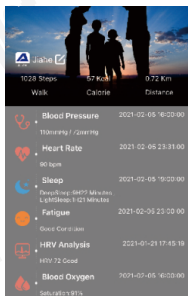

Außerdem kann durch Scannen des QR-Codes eines anderen Nutzers eine Folgeanfrage gestellt werden. Die QR-Code-Informationen befinden sich im Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke.

• Pflegeanfrage


Sie können jede CareMate-Anfrage genehmigen oder ablehnen, indem Sie im Dropdown-Menü oben rechts auf "Pflegeanfrage" klicken.

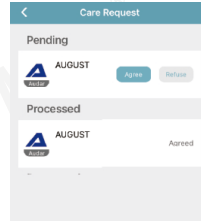

• Care Me

Wenn Sie im Dropdown-Menü oben rechts auf 'Care Me' klicken, erhalten Sie eine vollständige Liste aller CareMates, die Ihnen folgt sind.

Die Sichtbarkeit der einzelnen Gesundheitsdaten für Ihren CareMate kann jederzeit durch Anklicken des jeweiligen CareMates in der Liste geändert werden.

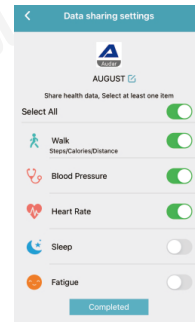

7. Problemlösung

Probleme	Lösungsvorschläge
Gerät schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none">■ Bitte laden Sie das Armband■ Halten Sie die Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt
Gerät wird nicht geladen	<ul style="list-style-type: none">■ Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den USB-Anschluss an■ Achten Sie darauf, dass der Magnetstecker richtig Kontakt mit dem Armband hat
Gerät wird nicht verbunden	<ul style="list-style-type: none">■ Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist■ Vergewissern Sie sich, dass sich das Armband nicht weiter als 10m vom Gerät entfernt befindet■ Vergewissern Sie sich, dass die Mac-Adresse auf dem Armband mit der in der App ausgewählten Mac-Adresse übereinstimmt■ Stellen Sie sicher, dass Sie die Systemanforderungen akzeptieren
Gerät zeigt keine Daten in der App	<ul style="list-style-type: none">■ Vergewissern Sie sich, dass das Armband mit Ihrem Gerät gekoppelt ist■ Versuchen Sie, die automatische stündliche Messung im Geräte-Management zu aktivieren
Gerät erhält keine Nachrichten	<ul style="list-style-type: none">■ Vergewissern Sie sich, dass das Armband mit Ihrem Gerät gekoppelt ist■ Überprüfen Sie die Erinnerungseinstellungen im Geräte-Management

8. Technische Daten

TFT-Farbdisplay	1.22inch
Bluetooth Version	v4.2BLE
Integrierter Akku	Li-Polymer Akku 220mAh
Betriebsdauer	ca. 5-7 Tage
Standbydauer	bis ca. 10 Tage
Armband Material	TPU
Schutzgrad	IP67
Nettogewicht	45g
Abmessungen	260x46,5x12,5mm

9. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

