

**AUDAR**<sup>®</sup>

**User Manual**

**E1**



**August International Ltd**

Rawmec Business Park  
Hoddesdon EN11 0EE  
United Kingdom  
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:  
Daffodil Germany GmbH  
Bayernstr. 10  
D-30855 Langenhagen  
Germany  
Tel: +49 (0) 511 97812978

[www.audarwatch.com](http://www.audarwatch.com)

- EN** Smart Healthcare Watch
- FR** Montre Connectée Santé
- DE** Intelligentes Gesundheitsarmband
- IT** Healthcare Intelligente d'Orologio
- ES** Pulsera Inteligente para el Cuidado de la Salud
- JP** スマートヘルスケアウォッチ

# Manual de Usuario

Gracias por adquirir el Pulsera Inteligente Audar E1. Este Manual ha sido diseñado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente esta instrucción para aprovechar al máximo las características del producto.

## Seguridad

Para garantizar la seguridad de usted y de los demás. Lea las Instrucciones de seguridad antes de usar este dispositivo. No desmonte el dispositivo. Puede ser inseguro e invalidará la garantía del Audar E1.

## Disposición

Asegúrese de que el producto y los accesorios se tiren de conformidad con la Directiva RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y cualquier otra normativa aplicable a su país. Siempre consulte con la agencia de medio ambiente y cualesquiera otras autoridades competentes para las regulaciones actuales.

## Declaración de conformidad




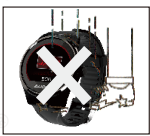
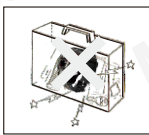

La Declaración de conformidad se puede encontrar en nuestro sitio web en:  
<http://augustint.com/en/declaration/>

## Servicio al Cliente

Puede contactarnos por teléfono al: 44(0)845 250 0586 o por correo electrónico a:  
[service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)  
si necesita más asistencia técnica o servicio al cliente.

## 1. Instrucciones de seguridad

### ■ Almacenamiento y uso

	Mantenga este dispositivo alejado de las temperaturas extremas.		Mantenga este aparato alejado del agua y la humedad.
	Nunca exponga este producto a la humedad, polvo, aceite o humo.		Evite dejar caer o la exposición a impactos.
	Nunca deje el aparato en contenedores inestables.		Nunca roce el aparato con objetos punzantes.

### ■ Mantenimiento

Por favor, desconecte todos los cables antes de limpiar el dispositivo.

	Por favor, limpie la estructura del altavoz con un paño suave.		Nunca limpie el dispositivo con paños abrasivos, alcohol benceno, o cualquier otro producto químico.
---	--	--	--

## 2. Características principales

- IMonitor de frecuencia cardíaca y presión arterial por la tecnología ECG / PPG
- IPasos, distancia recorrida y calorías
- IMonitoreo de calidad del sueño
- ISmart llamadas y notificaciones de mensajes
- Compatible con iOS y Android

## 3. Box Contents



E1



USB Cable Magnética



Manual del Usuario

## 4. Nombres de partes y funciones



1. Pantalla TET
2. Botón de tocar
3. Botón de encendido
4. Parte metal de ECG
5. Correa

## Guía de inicio rápido

1. Escanee el código QR a continuación con su dispositivo o busque AUDAR para descargar la aplicación desde Google Play o la tienda de APP de Apple.



Requiere Android 4.4 y superior o iOS 8.2 y superior.


1. Cargue completamente el E1 antes del primer uso o después de un largo tiempo sin usarlo. Para cargar el dispositivo, primeramente, conecte el E1 con el cable de carga magnético y luego inserte el conector USB del cable a un puerto USB con alimentación.
2. El icono de la batería se llenará durante la carga. Cuando se carga, se mostrará una batería llena. Asegúrese de que el voltaje de salida desde el puerto USB o el cargador es de 5V.
3. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para encender el E1.
4. Asegúrese de que el E1 está menos de 10 metros desde su dispositivo. Para emparejar, inicie AUDAR y presione 'Emparejar pulsera'. Asegúrese de otorgar permiso o aceptar el requisito del sistema cuando se le solicite.
5. Una vez emparejado, ingrese la información personal solicitada y presione GUARDAR. Luego, suba sus datos de salud (cuantos pasos que desea caminar cada día). Una vez terminado, presione GUARDAR para ir a la página inicial de la APP.
6. Su pulsera inteligente E1 está listo para el uso.

# Tabla del contenido

<b>1. Instrucciones de seguridad</b> -----	1
<b>2. Principales características</b> -----	2
<b>3. Contenido de la caja</b> -----	2
<b>4. Nombres de partes y funciones</b> -----	2
<b>5. Carga</b> -----	5
<b>6. Operación</b> -----	5
<b>6.1 Pulsera</b> -----	5
6.1.1 Hora y fecha (pantalla predeterminada)-----	5
6.1.2 Pasos-----	6
6.1.3 Calorías-----	6
6.1.4 Distancia-----	6
6.1.5 ECG-----	7
6.1.6 Frecuencia cardíaca-----	7
6.1.7 Presión arterial-----	8
6.1.8 Sueño-----	8
6.1.9 Temporizador-----	8
6.1.10 Mensajes-----	9
6.1.11 Buscar su teléfono móvil-----	9
6.1.12 Configuración de diales-----	10
6.1.13 Brillo-----	10
6.1.14 E1 Información-----	11
<b>6.2 AUDAR Application</b> -----	12
6.2.1 Emparejamiento-----	12
6.2.2 Información personal-----	13
6.2.3 Página de inicio-----	13
6.2.3.1 Pasos-----	14
6.2.3.2 Sueño-----	14
6.2.3.3 Ritmo cardíaco-----	15
6.2.3.4 Análisis de HRV (ECG)-----	16
6.2.3.5 Presión arterial-----	17
6.2.3.6 Fatiga-----	18
6.2.4 Opciones del dispositivo-----	19
6.2.4.1 Información personal-----	19
6.2.4.2 Informe semanal-----	20
6.2.4.3 Activar cámara-----	20
6.2.4.4 Correr-----	20
6.2.4.5 Gestión de dispositivos-----	21
6.2.4.6 Configuración general-----	23
6.2.4.7 Acerca de-----	23
6.2.4.8 Información de CareMate-----	23
<b>7. Solución de problemas</b> -----	26
<b>8. Especificaciones</b> -----	26
<b>9. Garantía</b> -----	27

## 5. Carga

Para cargar el E1, use el cable de alimentación para conectar el E1 a un puerto USB con alimentación.

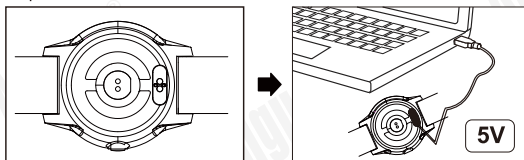

El icono de la batería se llenará mientras se carga. Cuando termina la carga, se mostrará una batería llena. Asegúrese de que el voltaje de salida desde el puerto USB o el cargador sea de 5V.

## 6. Operación

### 6.1 Pulsera

Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para encender el E1.

Para apagar el E1:

1. Pulse el botón táctil para elegir el modo de información sistémica de E1
2. Mantenga pulsando el botón táctil durante 3 segundos.
3. Pulse el botón táctil y seleccione SI.
4. Mantenga pulsando el botón táctil durante 3 segundos para confirmar que desea apagar el E1.

Presione el botón táctil para activar la pantalla. Una vez activado, la pantalla se iluminará durante 5 segundos. Mientras la pantalla está activada, presione el botón táctil para recorrer los siguientes modos: hora y fecha (pantalla predeterminada), pasos, calorías, distancia, ECG, frecuencia cardíaca, presión arterial, sueño, modo deportivo, cronómetro, mensajes, buscar Teléfono, marcaciones, brillo e información sistémica de E1.

Las medidas son SOLO de referencia y no son para uso médico.

### 6.1.1 Hora y fecha (pantalla predeterminada)



Semana

Fecha (Día/Mes)

Hora

Pasos

Frecuencia cardíaca



### 6.1.2 Pasos



Pasos caminados

La E1 mostrará la cantidad de pasos. Para un dato exacto, le recomendamos que se asegure de que los detalles ingresados en la sección de información personal sean lo más precisos y correctos posible (consulte 5.2.2).

### 6.1.3 Calorías



Calorías

El E1 calculará las calorías que ha quemado de acuerdo con el número de pasos que ha tomado.

### 6.1.4 Distancia



Distancia

La E1 calculará la distancia que ha caminado desde el número de pasos que ha tomado. Para una lectura precisa, recomendamos que se asegure de que los datos introducidos en la sección de información personal son tan precisos como sea posible (consulte 5.2.2)

### 6.1.5 ECG



ECG



Gesto de medición de ECG



Please touch the metal ring



Testing, Wait 28 s



TO APP

Cuando ingresa al modo ECG y mantiene presionado el botón táctil durante 3 segundos, se activa el ECG. Para medir el ECG, coloque el dedo pulgar y el índice en el círculo de metal del ECG como se muestra, y mantenga los dedos sin mover durante la medición. Esto puede tomar unos 30 segundos. Una vez terminado, los datos de ECG se pueden consultar en la APLICACIÓN AUDAR.

Nota: Si la forma de onda del ECG está desordenada o se desvía seriamente, la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden no estar precisas, por favor, vuelva a medir. Si la conductividad es pobre durante la prueba de ECG, humedezca la piel de la muñeca en el área que conecta con el sensor antes de la prueba. ¡Las medidas son solo de referencia y no son para uso médico!

### 6.1.6 Frecuencia cardíaca



000 Bpm

Frecuencia cardíaca

Cuando ingresa al modo de frecuencia cardíaca, el E1 comenzará a medir su frecuencia cardíaca. Esto puede tomar hasta un minuto. Una vez terminado, el E1 vibrará y mostrará su frecuencia cardíaca actual en BPM (latidos por minuto).

### 6.1.7 Presión arterial



Presión arterial

Cuando entre en modo de presión arterial, la E1 se iniciará la medición de la presión arterial. Esto puede tomar hasta un minuto. Una vez terminado, el E1 vibrará y mostrará el resultado de medición.

### 6.1.8 Sueño



Datos de sueño

Cuando entre en modo de sueño, E1 mostrará los datos sobre su sueño.

### 6.1.9 Temporizador



Temporizador

Presionando el botón táctil durante 3 segundos para iniciar el cronómetro. Presione una vez el botón táctil para pausar o reanudar el cronómetro. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para reiniciar el cronómetro y salir.


### 6.1.10 Mensajes



Mensajes

Cuando entre en el modo Mensajes, el E1 mostrará un resumen de los mensajes en su móvil. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos y el E1 mostrará detalles de los mensajes.

### 6.1.11 Buscar su teléfono móvil

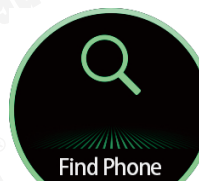

Buscar dispositivo emparejado

Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para activar la función "Find Paired Device". El dispositivo emparejado sonará o vibrará según su configuración, así que le permite localizarlo.

Nota: el dispositivo vinculado debe estar dentro del alcance de Bluetooth para poder encontrarlo (10 m). Si no puede oír el sonido del dispositivo, intente cambiar su sitio o habitación donde está y vuelva a activar la función.

### 6.1.12 Configuración de diales



Configuración de diales

Cuando ingrese a Configuración de Diales, presione el botón táctil para elegir diferentes diales.




Dials 1



Dials 2



Dials 3

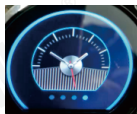

Dials 4

### 6.1.13 Brillo



Brillo

Pulse y mantenga pulsando el botón táctil durante 3 segundos para activar la función de ajuste de brillo. A continuación, pulse el botón para ajustar el nivel de brillo.

### 6.1.14 E1 Información



Información del sistema de E1

La sección de Información E1 le proporciona un identificador único para su reloj. Esto es útil si está emparejando el reloj cuando hay varios relojes E1 que está cerca.

Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos. Presione el botón táctil para seleccionar sí. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para confirmar que desea apagar el E1.



## 6.2 Aplicación AUDAR

Escanee el código QR a continuación o busque "AUDAR" para descargar e instalar la aplicación desde Google Play o Apple App Store.






Requiere Android 4.4 y superior o iOS 8.2 y superior.

### 6.2.1 Emparejamiento

1. Active el Bluetooth en su dispositivo y asegúrese de que se encuentre a menos de 10 metros del E1.
2. Inicie "AUDAR" y seleccione "Emparejar pulsera".
3. Seleccione E1 de la lista de dispositivos.
4. Si hay más de un E1 cerca, verifique la dirección MAC en el E1 para determinar cuál seleccionar (consulte 5.1.10).
5. Una vez emparejado, el ícono de estado de la conexión Bluetooth aparecerá en la pantalla del E1.


Tenga en cuenta: para dispositivos Android, asegúrese de otorgar permiso del sistema a 'AUDAR' cuando se le solicite. Para dispositivos iOS, asegúrese de confirmar el requisito de conexión Bluetooth cuando se le solicite.

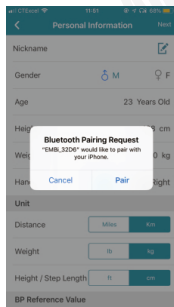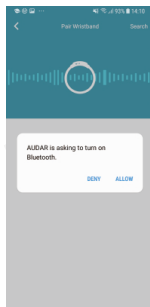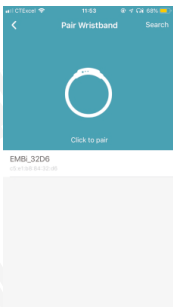

### 6.2.2 Información personal

Una vez que el E1 esté emparejado, ingrese la información personal solicitada y presione "Guardar". Luego, establezca su objetivo de salud (la cantidad de pasos que desea caminar cada día). Una vez terminado, presione guardar para ir a la página de inicio.

Puede editar esta información más tarde. Consulte 5.2.4.1 para obtener más instrucciones.

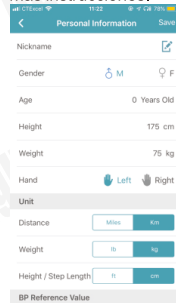

### 6.2.3 Página de inicio

La página de inicio le permite ver la cantidad de pasos que ha caminado, el tiempo que ha dormido y las mediciones más recientes de su ritmo cardíaco, análisis de HRV, presión arterial y estado de fatiga.




Nota: Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

### 6.2.3.1 Pasos

El conteo de pasos actual se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de pasos en la página de inicio para ver más información.

**Nota:** Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

- Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Toque una barra en el gráfico para ver el número exacto de pasos recorridos.
- Debajo del gráfico de barras, puede encontrar más información sobre los pasos dados, la distancia recorrida y las calorías quemadas.
- Presione <Notas> para cambiar su objetivo de salud (la cantidad de pasos que desea caminar cada día).
- Seleccione día, semana o mes para cambiar la duración del período que se muestra.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir la información más reciente.

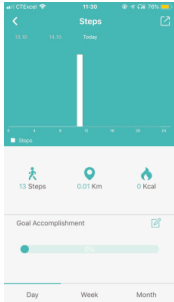


### 6.2.3.2 Sueño

Los datos de sueño más recientes se mostrarán en la página de inicio. Toque la sección de suspensión en la página de inicio para ver más información.

**Nota:** Las mediciones son solo de referencia y no son para uso médico.

- Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos más antiguos.
- Toque una barra en el gráfico para ver la cantidad exacta de sueño durante ese tiempo.
- Seleccione día, semana o mes para cambiar la duración del período que se muestra.
- Presione compartir y elija un servicio de redes sociales para compartir sus datos recientes de sueño.

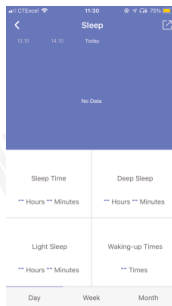


### 6.2.3.3 Frecuencia cardiaca

La medición de frecuencia cardíaca más reciente se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de frecuencia cardíaca en la página de inicio para ver más información o realizar una medición.

**Nota:** Las resultados de mediciones son solo para consulta y no son para uso médico.



- La medición última se muestra en la parte arriba de la pantalla.
- La monitorización de la frecuencia cardíaca y las pruebas de ECG en el dispositivo pueden actualizar los datos de la frecuencia cardíaca.
- Otras mediciones recientes se muestran en la parte abajo de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas anteriores.
- Seleccione un día, semana o mes para lograr el gráfico de sus mediciones de frecuencia cardíaca. Toque una barra en el gráfico para ver información más detallada. Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos antiguos.
- Presione compartir y elija redes sociales para compartir la resulta de medición más reciente.

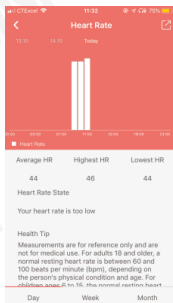

#### 6.2.3.4 Análisis de HRV (ECG)

Presione "Medición de ECG" y "comenzar a medir", la medición de ECG está activada. Para medir el ECG en la APLICACIÓN, ponga el pulgar y el dedo en el círculo de metal del ECG como se muestra, mantenga los dedos quietos durante la medición. Esto puede llevar unos 30 segundos. Una vez finalizado, se permite consultar los datos de ECG.

- La medición más reciente se muestra en la parte arriba de la pantalla.
- Otras medidas recientes se muestran en la parte abajo de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas históricas.
- Lo seleccione para ver los datos anteriores, puede ver el informe detallado / informe de salud y reproducir el ECG. Si la conductividad está pobre durante la prueba de ECG, humedadza la piel de la muñeca en el área de conexión del sensor con agua antes de la prueba.
- Presione compartir y elija redes sociales para compartir la medición más reciente.

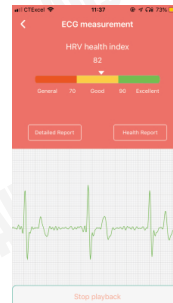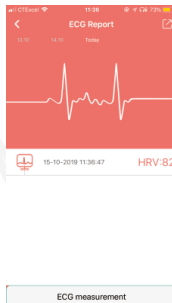


#### 6.2.3.5 Presión Arterial

La última medición de la presión arterial se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de presión arterial en la página de inicio para ver resultados anteriores o para realizar una nueva medición.

Nota: Las resultados de mediciones son solo para consulta y no son para uso médico.



- La medición más reciente se muestra en la parte arriba de la pantalla.
- Otras medidas recientes se muestran en la parte abajo de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas históricas.
- Seleccione día, semana o mes para ver un gráfico de barras de sus resultados de mediciones de presión arterial. Toque una barra en el gráfico para ver información más detallada. Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos anteriores.
- Presione compartir y elija redes sociales para compartir la medición más reciente.

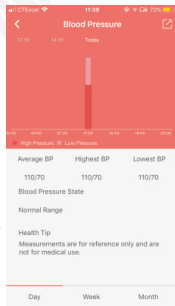

### 6.2.3.6 Fatiga


El estado de fatiga se mostrará en la página de inicio. Toque la sección de fatiga para ver información más detallada o realizar una nueva medición.

- La medición más reciente se muestra en la parte arriba de la pantalla.
- Otras medidas recientes se muestran en la parte abajo de la pantalla. Deslice hacia arriba para ver medidas historiales.
- Seleccione día, semana o mes para ver un gráfico de barras de sus resultados de mediciones de presión arterial. Toque una barra en el gráfico para ver información más detallada. Deslice la fecha hacia la derecha para ver datos anteriores.
- Presione compartir y elija redes sociales para compartir la medición más reciente.

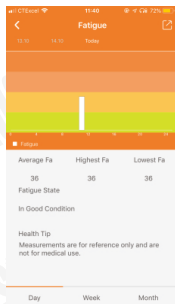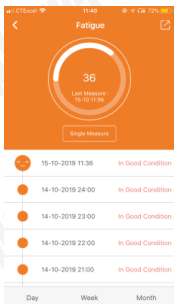

## 6.2.4 Opciones de dispositivo

Presione para mostrar el menú de opciones del dispositivo. Toque una de las opciones para ingresar a esa sección.

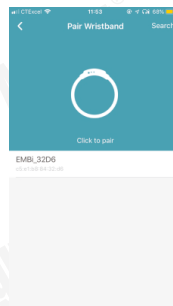

### 6.2.4.1 Información personal

Desde esta sección, puede ver y modificar la siguiente información personal:

- Género
- Edad
- Altura
- Peso
- Mano de uso
- Unidades utilizadas para distancia, altura y peso.
- Formato de tiempo
- valor de referencia de la presión arterial

Una vez finalizado, presione guardar para volver a la página principal de la aplicación.

Personal Information Save

Nickname

Gender  M  F

Age  Years Old

Height  175 cm

Weight  75 kg

Hand  Left  Right

Unit

Distance  Miles  Km

Weight  lbs  kg

Height / Step Length  in  cm

BP Reference Value

### 6.2.4.2 Informe semanal

El informe semanal le permite ver todos los datos de la semana anterior en una pantalla.



### 6.2.4.3 Activar cámara

Esta función le permite activar la cámara en su teléfono de forma remota agitando el EMBi.

1. Toca "Activar cámara" para comenzar.
2. Una vez que la cámara está activada, agite la muñeca con el EMBi para tomar una foto.
3. Presione "Cancelar" para volver a la página de inicio.




### 6.2.4.4 Correr

Esta función te ayudará a controlar tu carrera.

Presione "Acumulativo Carrera X veces" para ver su historial de carreras.

Presione "Iniciar" para comenzar a correr.

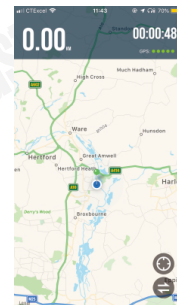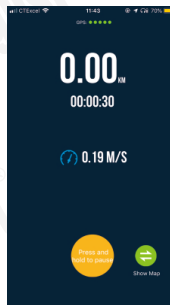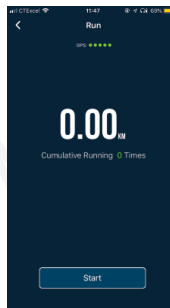


- Presione < > para alternar entre la visualización normal y la de mapa.
- Mantenga presionado el botón amarillo para pausar.
- Mientras está en pausa, presione el botón verde para reanudar.
- Presione el botón rojo para finalizar la carrera.





### 6.2.4.5 Gestión de dispositivos

La pantalla de administración del dispositivo le permite verificar el nivel de batería del EMBi y usar las siguientes funciones:



- Gestión de conexión
  - Ver el estado de conexión de la pulsera
  - Emparejar o desemparejar la pulsera
- Buscar la pulsera
  - Al presionar "Buscar pulsera", la pulsera vibrará, permitiéndole encontrarla. Nota: la función de búsqueda solo funcionará si la pulsera está dentro del alcance de Bluetooth (10 m).
- Recordatorio (le permite configurar notificaciones vibrantes silenciosas)
  - Notificación de llamada telefónica: se mostrará <  > cuando haya una llamada entrante.
  - Notificación de mensaje: se mostrará <  > cuando haya un mensaje entrante.
  - Reloj despertador: la pulsera vibrará a la hora establecida y se mostrará <  > en la pantalla.
  - Notificación de aplicaciones: desde esta sección, puede alternar si desea mostrar notificaciones de una variedad de aplicaciones como Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.
  - No molestar: la función no molestar le permite establecer un período durante el cual se ignorarán todas las notificaciones (por ejemplo, durante la noche de 23:00 a 08:00).
- Activación automática de pantalla: mientras está habilitada, la pantalla se activará cuando mueva su muñeca.
- Medición automática por hora: mientras está habilitado, una medición se realizará automáticamente cada hora en punto. Recomendamos habilitar esta función para recibir los datos más precisos.
- Actualización del firmware: esta página muestra la versión actual del firmware de la pulsera y le informa si hay una versión más nueva disponible.

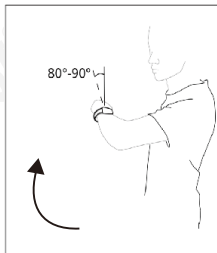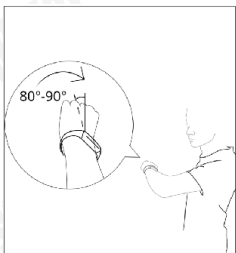

### 6.2.4.6 Configuración General

- Información personal: consulte la sección 5.2.4.1 para obtener más información.
- Objeto de salud: le permite establecer la cantidad de pasos que desea caminar cada día.
- Integración de aplicaciones de terceros
  - Apple Health (solo dispositivos Apple)
  - Google Fit (solo dispositivos Android)
- Restaurar configuración de fábrica: le permite realizar un restablecimiento completo original, que eliminará todos los datos y eliminará la conexión entre la aplicación y la pulsera.
- Eliminar datos: le permite eliminar todos los datos guardados en la aplicación.

### 6.2.4.7 About

La sección About muestra el número de versión de la aplicación y le permite acceder a la función de Ayuda.



Desde la sección de Ayuda, puede

- Envíenos sus comentarios y sugerencias sobre la pulsera o la aplicación AUDAR, o informe un error.
- Ver una lista de preguntas frecuentes (toque una de las preguntas para leer la respuesta).


### 6.2.4.8 Información de CareMate

Subscribirse a la información de salud de alguien

Una solicitud para ser un CareMate puede ser enviada buscando el número de teléfono móvil o el correo electrónico utilizado para registrarse en una cuenta AUDAR.

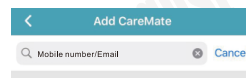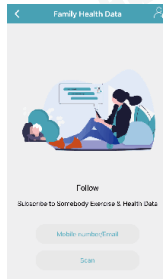


Una vez aprobada la solicitud, hacer clic en "Mi Guardián" en la esquina superior derecha para ver una lista de usuarios a los que sigues y monitorizar sus datos de ejercicio y salud en tiempo real.

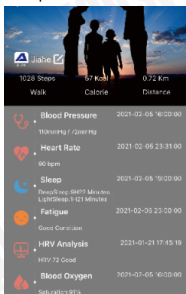

Además, se puede enviar una solicitud de seguimiento escaneando el código QR de otro usuario. La información del código QR se encuentra en el menú desplegable de la esquina superior derecha.

#### ● Care Solicitud


Puedes aprobar o rechazar cualquier solicitud de CareMate haciendo clic en "Solicitud de CareMate" en el menú desplegable de la esquina superior derecha.

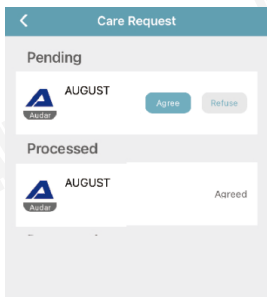

#### ● Care a mí

Haciendo clic en "Mi Tutela" en el menú desplegable de la esquina superior derecha, puede acceder a una lista completa de todos los CareMate que le han seguido.

La visibilidad de la información sanitaria de su CareMate puede modificarse en cualquier momento tras hacer clic en el CareMate individual de la lista.

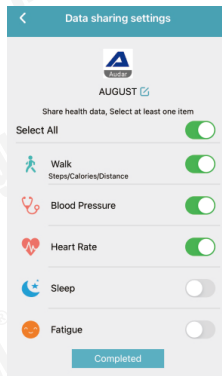

## 7. Solución de Problemas

Problemas	Soluciones
No se puede encender	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cargue completamente el E1</li><li>■ Presione y mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos</li></ul>
No se puede cargar	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vuelva a conectar E1 con el cable de carga</li><li>■ Utilice el cable de carga proporcionado para conectarse al puerto USB con alimentación</li></ul>
No se puede emparejar	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirme que Bluetooth está abierto en su dispositivo</li><li>■ Confirme que el E1 está dentro de los 10m con el dispositivo</li><li>■ Confirme que la dirección Mac de E1 es la misma que se muestra en la aplicación</li><li>■ Asegúrese de que acepta los requisitos del sistema al emparejar</li></ul>
No hay datos en la aplicación	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirme que el E1 está emparejado con el dispositivo</li><li>■ Intente abrir la medición automática por hora en la gestión de dispositivos</li></ul>
Incapaz de recibir notificaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Confirme que el E1 está emparejado con su dispositivo</li><li>■ Compruebe la configuración de Recordatorio en la sección 'Administración de Dispositivo'</li></ul>

## 8. Especificaciones

Pantalla a color TFT	1.22 inch
Versión de Bluetooth	v4.2BLE
Tipo de Batería	Batería de polímero de litio 220 mAh
Tiempo de trabajo	5-7 Días
Tiempo de espera	Hasta 10 días
Tiempo de carga	Cerca de 2 horas
Material de la correa	TPU
A prueba de polvo & impermeable	IP67
Peso neto	45g
Dimensiones	260x46.5x12.5mm

## 9. Garantía

El producto tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es valida en el país donde el producto fue adquirido.
- El producto debe haber sido correctamente instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto ha de haber tenido un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal, no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver ningún producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y en su caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios legales.

### Atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correoelectrónico: [service-es@augustint.com](mailto:service-es@augustint.com)

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

